

クイックガイド

各部の名前



サンプルの準備

プロサイト One*は様々なサイズのEDTAチューブと互換性があります。必要なサンプル量はチューブの種類によって異なりますので、**チューブの説明書に従ってください。**

- EDTAとサンプルは適切な割合を保ってください。
- サンプルの凝固や凝集につながる可能性があるため、規定量以上のサンプルをチューブに分注しないでください。
- 赤血球収縮（円鋸歯状化）などの形態学的変化につながる可能性があるため、規定量以下のサンプルをチューブに分注しないでください。

サンプルの測定

1. IDEXX ベットラボ*ステーションで検査を開始します（詳細は、「IDEXX ベットラボステーション簡易操作ガイド」）を参照してください）。
2. 検査機器の選択画面で患者情報を確認した後、**ProCyte One**アイコンを選択し、**測定**を選択します。
3. チューブを10回転倒混和し、サンプルと抗凝固剤を混ぜます。正確な結果を得るため、**転倒混和後すぐに**チューブをサンプルトレイの手前側のスロットに置き、サンプルトレイを閉じ、前面にある**スタート**ボタンを押します。

重要：微量採血管を使用する場合は、サンプルトレイに置く前にキャップを外してください。

試薬パック、シースパックおよびSmartQC コントロールの交換方法

パックが空になった、もしくは使用期限が切れた場合は、速やかにパックを交換してください。

1. 正面ドアを開けます。
2. 試薬パックの**交換**：検査器の内側から小さい灰色の試薬パックを引き出します。次に、新しい試薬パックをカチッという音がするまで奥に差し込みます。



シースパックの**交換**：検査器の内側から大きい灰色のシースパックを引き出します。次に、新しいシースパックをカチッという音がするまで奥に差し込みます。

3. 正面ドアを閉めます。
注意：パックが正しく取り付けられていない場合は、正面ドアは完全に閉まりません。



SmartQC コントロールの交換：

SmartQC* コントロールは、プロサイトOne専用の品質管理用試薬で、サンプルトレイに設置し、検査器の品質を監視するため定期的に使用します。

SmartQC コントロールのバイアルが空になった、もしくは使用期限が切れた場合は、速やかに交換してください。

1. サンプルトレイを開けます。
2. 空や期限切れのSmartQC コントロールのバイアルを取り出します。
3. **新しいSmartQC コントロールを10秒間激しく振り、十分混和した後**サンプルトレイの奥側のスロットに設置します。
4. サンプルトレイを閉じます。

