

カタリスト* SmartQC* Control クイックガイド

保管方法、使用上の注意


- + 温めたり、溶液の調製を行う必要はありません—冷蔵庫から取り出してそのまま測定できます。
- + 冷蔵保管。凍結不可。
- + 未開封の小袋は、室温で最長8時間、最大5回まで保管できます。8時間経過後は、未使用/未開封の備品は冷蔵庫で保管してください。
- + 誤って冷凍した場合：
 - + 8時間未満であれば、使用前に60分以上かけて室温で解凍してください。
 - + 8時間を超えた場合は、廃棄してください。

カタリストSmartQC Controlは、セットと操作が簡単に行えます

カタリストOne



カタリストDx

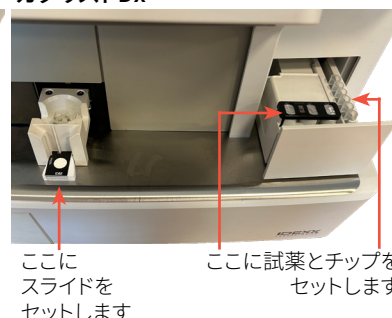

よくある質問 (FAQ)

質問	回答
カタリストSmartQC Controlとは何ですか。	カタリストSmartQC Controlは、IDEXX カタリスト One (Catalyst One* Chemistry Analyzer、動物用一般医療機器/臨床化学分析装置) またはIDEXX カタリスト Dx* (Catalyst Dx* Chemistry Analyzer、動物用一般医療機器/臨床化学分析装置) が正しく機能していることを確認するために使用する品質管理用備品 (カタリストクリップおよび試薬パック) です。
カタリストSmartQCを使用するタイミングを教えてください。	カタリストSmartQCは、月1回行う検査器の内部部品のクリーニング後や、設置・移動した際に実行する必要があります。
カタリスト SmartQCの実行手順を教えてください。	1. カタリスト検査器の内部部品をクリーニングします。 2. カタリストOneの場合：IDEXXベットラボ*ステーションの初期画面で「Catalyst One」アイコンをタップし、「メンテナンス」、「SmartQC」、「SmartQCの実行」の順にタップします。 または カタリストDxの場合：IDEXXベットラボステーションの初期画面上の「Catalyst Dx」アイコンをタップし、「SmartQC」、「SmartQCの実行」の順にタップします。 3. IDEXXベットラボステーション (カタリストOne) またはカタリストDxのタッチスクリーン (カタリストDx) に表示される画面上の指示に従って、SmartQC溶液を検査器内にセットし、検査を完了します。
カタリストSmartQCを患者検体または別のカタリストクリップ/スライドと一緒に実行できますか。	いいえ。QCを実行する際は、サンプルトレイにピペットチップ、カタリストSmartQCのクリップと試薬のみをセットしてください。サンプルカップ、全血セパレーター、その他のクリップ/スライド (毎月QCが必要なカタリストLyte 4クリップを含む) はセットしないでください。
カタリストSmartQCの測定時間はどれくらいですか。	カタリストSmartQCの測定結果は、測定開始から15分以下で得られます。
カタリストSmartQCの結果は表示されますか。	はい。「合格」または「測定範囲外」の検査結果が表示されます。 + 「合格」は、検査器が最適な状態で機能しており、必要に応じて継続してご利用いただける状態です。 + 「測定範囲外」は、測定中に問題が検出されたことを示しています。検査結果が「測定範囲外」の場合は、カタリスト SmartQCの新しいスライドと試薬を用いて、再度測定を行ってください。2回目の実行も「測定範囲外」であった場合は、IDEXXテクニカルサポートにご連絡ください。
カタリストSmartQCの実行が必要な時にリマインダーを送る方法を教えてください。	1. カタリストOneの場合：IDEXXベットラボ*ステーションの初期画面で「Catalyst One」アイコンをタップし、「メンテナンス」、「SmartQC」の順にタップします。 または カタリストDxの場合：IDEXXベットラボステーションの初期画面上の「Catalyst Dx」アイコンをタップし、「QC (品質管理)」をタップします。 2. 画面左側のドロップダウンリストから、リマインダーメッセージを定期的に受信するタイミングを選択します。