

スナップ・ジアルジア



【一般的注意】

1. 定められた使用方法を厳守すること。
2. 本キットは、使用目的において定められた目的にのみ使用すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

- デバイス
抗ジアルジア抗原ウサギポリクローナル抗体
抗西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼヤギポリクローナル抗体
ウサギIgG
TMB溶液
洗浄液*
- サンプルスワブ*
西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼ標識抗ジアルジア抗原マウスモノクローナル抗体

*イソチアゾリン系防腐剤含有

【使用目的】


犬及び猫の糞便中のジアルジア (*Giardia intestinalis*) 抗原の検出

【使用方法（操作方法）】

- 使用検体
1. 新鮮便、冷凍保存した便、あるいは2～8℃に冷蔵保存した7日以内の便
 2. 検体は、18～25℃に戻してから使用すること

操作手順


1. サンプルスワブのチューブをはずし、綿棒の先に検体を適量つけ、チューブを元の位置に戻す。

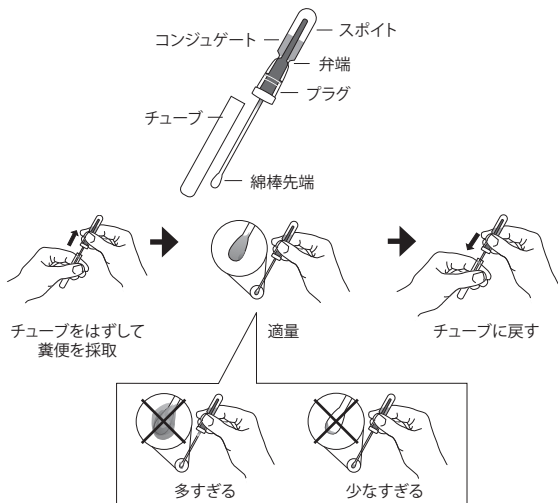



2. 弁端（くびれている部分）を折ることにより、コンジュゲートがチューブのほうへ流れ込む。スポイトを3回絞り、コンジュゲートと検体をよく混和させる。



3. デバイス本体を水平に置き、スポイトを押して綿棒の先からコンジュゲートと混和した検体（サンプル）5滴をサンプル注入口に注ぐ。このとき、サンプルが飛び跳ねないように注意してゆっくりと滴下する。サンプルは反応膜を横切りアクティベートサークルの方向に流れる。

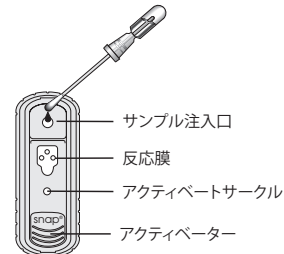

4. サンプルが反応膜を横切り、アクティベートサークルに達したらすぐに、アクティベーターを押す。このときアクティベーターが本体基底部と水平になるまで完全に押し下げる。

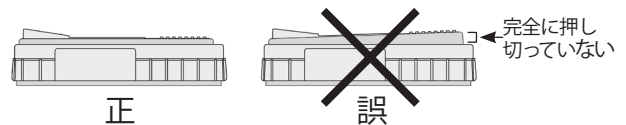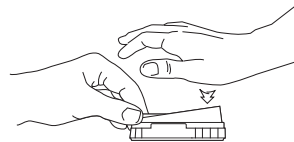


※ 60秒経過後もアクティベートサークルに達しない場合には、サンプルが反応膜を通過した時点でアクティベーターを押す。

5. 8分後判定を行う。
※陽性コントロールスポットがすぐに発色するかもしれないが、判定は、8分後に行うこと。

【測定結果の判定法】

反応膜の陰性コントロールスポットとサンプルスポットの発色度合いを比較することにより、判定する。

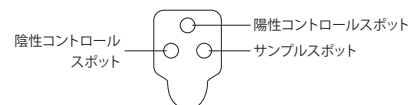


陰性

- 陽性コントロールスポットのみ発色した場合
- サンプルスポットの発色が陰性コントロールスポットの発色と同等の場合（陽性コントロールスポットの発色あり）



陽性

サンプルスポットの発色が陰性コントロールスポットの発色よりも濃い場合（陽性コントロールスポットの発色あり）

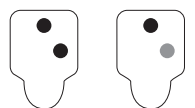

判定保留

- * サンプルスポットの発色が陰性コントロールスポットの発色よりも薄い場合
- * バックグラウンドが発色し、結果判定が困難な場合
- * 陽性コントロールスポットが青色に発色しない場合
- ◎ 判定保留の場合には再検査を行う

【取扱い上の注意】

1. 検体は、新鮮便、冷凍保存した便、あるいは冷蔵保存した7日以内の便を用いること。検査を行う際、検体は18～25℃に戻して使用すること。
2. デバイスおよびサンプルスワブは、18～25℃に戻してから使用すること。加温しないこと。
3. ジアルジア感染の可能性を考慮して、検査時には手袋を使用するなど、検体の取扱いには十分に注意すること。
4. デバイスおよびサンプルスワブは検査ごとに新しいものを使用すること。
5. 異なる製造番号のデバイスおよびサンプルスワブを組み合わせで使用しないこと。
6. 使用期限の過ぎたキットは使用しないこと。
7. 検査中はデバイスを常に水平に保つこと。
8. 使用前にアクティベーターを押さないように注意すること。
また、検体を加える前にアクティベーターを押してしまったデバイスは使用しないこと。
9. アクティベーターを押したデバイスは強い光にさらさないこと。
10. 使用済みのデバイスおよびサンプルスワブは、地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分し、作業終了後には作業場所をきれいに消毒すること。

【保管上の注意】

1. デバイスおよびサンプルスワブは、2～8℃に保存すること。
2. 直射日光又は冷凍は品質に影響を与えるので、避けること。
3. 小児の手の届かないところに保管すること。

【貯蔵方法・有効期間】

- 1) 貯蔵方法
2～8℃で保存
- 2) 有効期間
外箱に記載

【包装単位】

デバイス 5 個
サンプルスワブ 5 個

【問い合わせ先・製造販売元】

製造販売元：

アイデックスラボラトリーズ株式会社
テクニカルサポート 0120-71-4921
(自動音声案内 1 番)

製造元：

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092 USA

IDEXX

VLN: 313

© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved.

*SNAP is a trademark or registered trademark of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.

06-26880-05