


カタリスト コルチゾール (Catalyst™ Cortisol)

動物用体外診断用医薬品 | 血液検査用コルチゾールキット

結果解釈コメントを有効化する

カタリスト コルチゾールの結果解釈コメントは、患者にとって最適な次のステップを確認するのに活用できます。この重要な情報を最大限活用するため、次の質問を確認し、以下のStepに従ってください。

- + 同じ患者に対してコルチゾール検査を複数回実施しますか？「はい」の場合、かつ、すでに初回のコルチゾールを実施している場合は、**総合的解釈コメント**にアクセスするために、下記の「**追加検査...**」の指示に従って、各定量結果が順番にグループ化されていることを確認してください。
- + プロトコル情報を入力しましたか？結果に応じた解釈コメントを受け取るためには、患者の検査に対して適切なプロトコルとその手順を選択する必要があります。以下の検査器固有のワークフローに必ず従ってください：

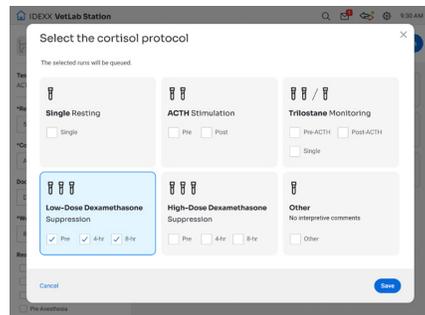

新規コルチゾール検査用

追加検査 / 多段階コルチゾール検査

IDEXX カタリストOne (Catalyst One™ Chemistry Analyzer)



IDEXX ベットラボ ステーション (IDEXX VetLab™ Station)で測定を開始します。[検査機の選択] 画面で、**[Catalyst One]** をタップし、次に **[コルチゾール]** をタップします。希望するプロトコルと追加のステップを選択し、**[保存]** をタップしてから、**[測定]** をタップします。

新規検査が処理された際に選択されたすべてのプロトコルステップは、IDEXX ベットラボ ステーションのホーム画面にある **[検査中]** リストに表示されます。次の検体を処理するタイミングになったら、リスト内の次に利用可能な検査をタップし、**[キューに追加]** をタップしてから、**[測定]** をタップします。

IDEXX カタリストDx (Catalyst Dx™ Chemistry Analyzer)



IDEXX ベットラボ ステーションで通常通りに検査を開始します。検査の終了時にプロトコルとその手順の確認画面が表示されたら、確認の後、**[送信]** をタップします。

注意: プロトコルやそのステップの入力を後で行う場合は、検査中のリストから該当の患者をタップし、**[詳細を追加]** をタップして、患者のプロトコル情報を選択します。

追加の検査結果を新規検査結果と正しく紐づけ、解釈コメントを確認するには：

1. IDEXX ベットラボ ステーションで該当の患者の新規測定されたコルチゾール結果を探すか、または初期画面の **[検査待ちリスト]** から該当の患者を選択します。
2. **[検査追加]** をタップし、次に **[追加測定]** をタップします。
3. **[検査機の選択]** 画面で、**[Catalyst Dx]** を選択します。
4. 検査終了時にメッセージが表示されたら、プロトコル情報を選択し、**[送信]** をタップします。

重要: Catalyst One と Catalyst Dx の両方の検査器をお持ちで、患者のコルチゾール結果の推移を確認したり、追加検査や複数のコルチゾール検査を行う予定がある場合は、すべてのコルチゾール検査を同じ検査器、同じ検体種類で実施することを IDEXX は推奨します。

定量結果および解釈コメントを確認するには

IDEXX ベットラボ ステーションの左下に表示される患者結果が準備できたことを示すメッセージをタップします。多段階コルチゾール検査の一環として追加検査が行われた場合、結果は最新の追加検査が上部、新規検査が下部に表示されます。総合的な解釈コメントは最新の検査結果とともに表示されます。