血液化学検査器

IDEXX カタリストOne (Catalyst One* Chemistry Analyzer)

ユーザーガイド





各部の名称



検査器ステータス

ランプの色	説明
緑(点灯)	検査器は検体を処理したり、メンテナンスを実行する準備ができている状態です
緑(点滅)	検査器は、スタンバイモードです。
黄(点灯)	検査器は検体を処理中であるか、あるいは別の動作を実行中です
黄(点滅)	IDEXX ベットラボ ステーション (IDEXX VetLab* Station)から患者情報を受信後、 ユーザーが検体の処理を開始するのを待っています
赤色(点滅)	エラーが発生しました(IDEXX ベットラボ ステーションに表示されるお知らせメッセージを確認してください)

注記:IDEXX ベットラボ ステーションのホーム画面に表示されるアイコンからも検査器のステータスを確認できます。

対象動物種

犬、猫[†]

†これらの動物種は、ライフステージごとに基準範囲が設定されている動物種です。

検査の手順

検体を準備します。詳細な手順については、 IDEXXカタリストOne (Catalyst One* Chemistry Analyzer) 操作ガイドをご覧ください。

2 IDEXX ベットラボステーション (IDEXX VetLab* Station) に 患者情報を入力します。

検体種類	必要な検体量					
全血	カタリスト へパリンリ チウム全血セパレー ター(以下、全血セ パレーター)へ0.6- - 0.8cc (600-800 µL) 入 れます。					
	全血セパレーターの一 番下のラインが0.7 cc (700 µL)です。					
血清、血漿、尿	使用するスライドの数によって異なります。 (Chem 17クリップおよび電解質の検査を実施する場合、推奨する検体量は300 μLです。)					



3 下記のとおり、検体、スライド、カタリストピペットチップ(以下ピペットチップ)、その他必要な検査用品をサンプルトレーにセットします。

注記:1回の実施で、全血セパレーターとカタリストサンプルカップ(以下、サンプルカップ)の両方をセットしないでください。

4 サンプルトレーを閉じて、検査器の「測定開始ボタン」 を押してください。





メンテナンスおよびその他作業の流れ

品質管理(QC)の実施、月1回の検査器内部部品のクリーニング、または自動希釈とUPCの実施に関する詳細な手順は、IDEXX ベットラボステーションタッチスクリーンに表示される画面上の指示をご参照ください。


カタリスト(Catalyst*)クリップおよびスライド

血液化学検査	略語	カタリストChem 17クリップ*	カタリストChem 15クリップ*	カタリストChem 10クリップ*	カタリスト UPC*	カタリストLyte 4クリップ	カタリストロCクリップ	単項目スライド
アルブミン	ALB	✓	✓	✓			✓	✓
アルカリフォスファターゼ	ALKP	✓	✓	✓			✓	✓
アラニンアミノトランスフェラーゼ	ALT	✓	✓	✓			✓	✓
アミラーゼ	AMYL	✓						✓
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST							✓
総胆汁酸	TBA							✓
尿素窒素	BUN	✓	✓	✓				✓
カルシウム	Ca	✓	✓				✓	✓
コレステロール	CHOL	✓	✓					✓
クレアチンキナーゼ	CK							✓
クレアチニン	CREA	✓	✓	✓				✓
クロール	Cl-					✓		
C反応性タンパク [‡]	CRP							✓
フルクトサミン	FRU							✓
ガンマグルタミルトランスフェラーゼ	GGT	✓	✓					✓
グルコース	GLU	✓	✓	√			✓	✓
カリウム	K ⁺					✓		
乳酸	LAC							✓
乳酸脱水素酵素	LDH							✓
リパーゼ	LIPA	✓						✓
マグネシウム	Mg							✓
ナトリウム	Na+					✓		
アンモニア	NH ₃						✓	✓
フェノバルビタール†	PHBR							✓
無機リン	PHOS	✓	✓					✓
プロゲステロン	PROG							✓
対称性ジメチルアルギニン	SDMA							✓
総ビリルビン	TBIL	✓	✓					✓
総タンパク	TP	✓	✓	✓				✓
総サイロキシン	トータルT4							✓
トリグリセライド	TRIG							✓
尿中クレアチニン	UCRE				✓			
尿タンパク	UPRO				✓			
尿酸	URIC							✓



^{*}動物用体外診断用医薬品



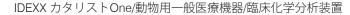

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc.無断複写·All rights reserved. · 06-0039287-00



^{*} Catalyst One, IDEXX VetLab, and Catalyst are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.