

IDEXX コアグDx カートリッジ Citrate APTT

IDEXX Coag Dx* Citrate Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)

IDEXX コアグDx カートリッジ Citrate PT

IDEXX Coag Dx* Citrate Prothrombin Time (PT)

【一般的な注意】

- 1) 定められた使用方法を厳守すること。
- 2) 使用目的において定められた目的にのみ使用すること。
- 3) 使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書（簡易操作ガイド）を必ず参照すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

・反応系に関する成分

IDEXX コアグDx カートリッジ

Citrate APTT：カオリン、リン脂質、カルシウム塩

Citrate PT：トロンボプラスチン、カルシウム塩

【使用目的】

IDEXX コアグDx カートリッジ

Citrate APTT：犬、猫のクエン酸加全血を使用した活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）の測定

Citrate PT：犬、猫のクエン酸加全血を使用したプロトロンビン時間（PT）の測定。

【使用方法（操作方法）】

- ・使用する測定装置
IDEXX コアグDx (IDEXX Coag Dx*)
- ・使用検体
犬、猫のクエン酸加全血
- ・測定の手順
測定には、専用の分析装置の添付文書及び取扱い説明書（簡易操作ガイド）を参照すること。

【測定結果の判定法】

検査結果に表示されている基準値及びコメントを参照のこと。

【取扱い上の注意】

- 1) 測定には、専用の分析装置を用いること。
- 2) 使用期限の過ぎた製品や保管が不適切であった製品は使用しないこと。
- 3) アルミ箔の袋は、使用直前に開封すること。
- 4) カートリッジは、室温に戻してから使用すること。
- 5) 検査を行う血液は、クエン酸ナトリウムと十分に混和させること。

- 6) 正しい結果を得るために採血を正しく行い、検体は適切に取り扱うこと。
- 7) 結果は、検体採取方法やサンプルウェルへの滴下を含めた手技に影響され、また、精度は、検体の泡立ち、溶血、凝固血や部分的に凝固のある血液といった検体の状態により影響を受けるので注意すること。
- 8) カートリッジは無理に挿入しないこと。挿入できない場合は、静かに取り外し、挿入部を点検すること。再挿入前に障害物は取り除くこと。
- 9) 結果は、測定対象動物の容態と抗凝固療法を考慮した上で検討すること。測定対象動物の臨床症状と整合性のない結果の場合、再検査をおこなうか追加検査データを補足すること。
- 10) 時間が測定可能範囲外となった場合、異常と判断し、再検査するか、判定可能範囲超過であることを結果とすること。
- 11) 測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること

【保管上の注意】

- 1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- 2) 直射日光、高温、凍結及び多湿は品質に影響を与えるので避けること。

【貯蔵方法・有効期間】

- 1) 貯蔵方法
2-8℃で保存
- 2) 有効期間
12か月

【包装単位】

カートリッジ 10個（個別包装）
ディスプレイブルピペット 11個

【問い合わせ先・製造販売元】

アイデックスラボラトリーズ株式会社
テクニカルサポート 0120-71-4921
（自動音声案内1番）