

IDEXX ベットラボ*UA* 測定方法

ベットラボ UA*での測定

遠心前の新鮮な尿をご使用ください。検体はしっかりと転倒混和してください。検体は常温で測定し、1時間以上常温に置かないでください。詳細な操作方法に関しては、ベットラボ*UA*操作ガイドを参照ください。



- 1 ピペットを使用して尿検体をUAストリップ上のテストパッド全体がしっかり湿るよう点着します。ストリップは曲げないでください。

重要：ベットラボUAは専用のストリップのみ使用可能です。その他のストリップは使用しないでください。



- 2 ストリップの上部端から下部のテストパッドを吸収性のあるティッシュなどの上で軽く叩き、余分な水滴を取り除いてください。



- 3 ストリップ上部をクリップに固定し、テストパッドを上向きにストリップトレイにセットします。



- 4 「スタート」ボタンを押すとビープ音が鳴り、トレーが中へ移動してストッパーが閉じます。

トレーが自動的にストリップを中へ引き込み、測定後に元の位置に戻ります。ストリップは本体が測定モードになるまで取り出さないでください。「スタート」ボタンを押して約80秒で測定が完了します。



- 5 結果が印刷されましたら、ストリップを取り出し、廃棄してください。汚れが残っている場合は、ベットラボUAを清掃してください。

重要：ベットラボUAをベットラボステーションに接続している場合、検査結果は自動的に転送されます。

テクニカルサポート

0120-71-4921

音声ダイヤル1番