

## IDEXX ベットラボステーションでの尿沈渣画像表示イメージ 半定量結果と合わせ、画像をご確認ください

### 全画像表示



- 優先順位の高い12枚を表示。  
「すべてを表示」から全70枚を確認することもできます。
- 最優先の3枚を自動で保存。  
手動で3枚追加が可能です。  
選択されていない画像は1か月間保存されます。
- 自動選択された3枚と手動で追加した3枚（最大6枚）をベットコネクトプラスに転送。

### 特定画像の拡大表示



- 1枚ずつ画像を拡大表示して確認できます
- 検査結果レポートには、1枚目の画像の中央部が含まれます  
印刷に含める領域を変更することもできます。
- 有形成分を確認しやすくするため、タグ表示や拡大表示、コントラストを反転させた表示が可能です

## IDEXX ベットラボステーションでの尿沈渣画像表示イメージ 半定量結果と合わせ、画像をご確認ください

### タグ表示

- 矢印ボタンを選択すると、セディビューDxが特定した有形成分にタグを表示させることができます




### コントラストの反転

- 通常表示で見づらい画像の場合、コントラストを反転させることができます。



### 拡大表示

- 拡大ボタンから画像を拡大表示させることができます。

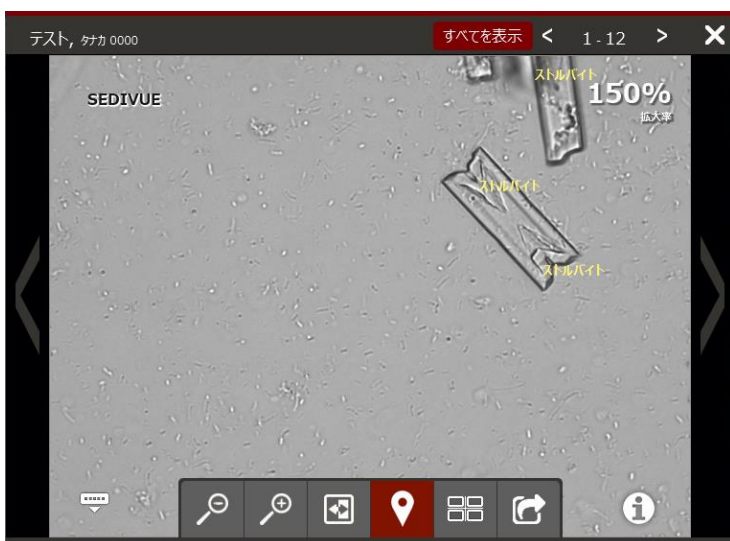

### 印刷領域の変更

- 赤枠をドラッグし、検査結果レポートに含める画像領域を変更することができます

