

IDEXX スナップ Pro*のクリーニング

内部のクリーニング（週1回または必要に応じて実施）



1. IDEXX スナップ Proの電源を切り、電源コードおよびイーサネットコードの接続を解除してください。




2. 検査器の底にある、2つの銀色の留め具をマイナスドライバーなどを使用し、反時計回りに4分の1回転します。



3. IDEXX スナップ Proから底面を外します。



4. 糸くずの出ない布または綿棒に70%のイソプロピルアルコール、中性洗剤および水、または10%漂白剤溶液を少し含ませて底面**全体**を清掃します。

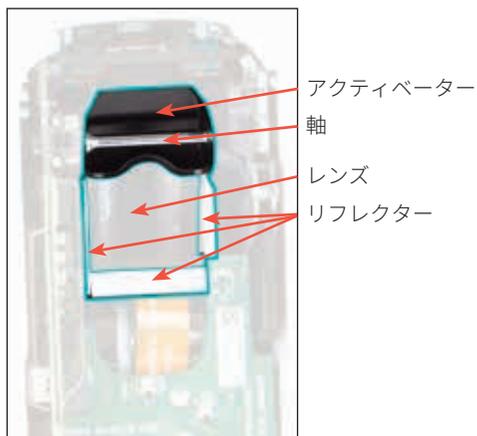

5. 糸くずの出ない布または綿棒に70%のイソプロピルアルコール、中性洗剤および水、または10%漂白剤溶液を少し含ませて3つの白色リフレクター、軸およびアクティベーターを清掃します。**レンズは清掃しないでください。**



6. 底面を乾燥させたあと、IDEXX スナップ Proにとりつけ、しっかりとつけたことを確認します。



7. 銀色の留め具を時計回りに4分の1回転させ、底面をロックします。



8. 底面と銀色の留め具がしっかりと取り付けられ、ロックされたことを確認します。**底面と留め具が正しくロックされない、IDEXX スナップ Proの性能に影響がでることがあります。**

ケースと画面のクリーニング（必要に応じて実施）



糸くずの出ない布に70%のイソプロピルアルコール、中性洗剤、水、または10%漂白剤溶液を少し含ませてケースとタッチスクリーンを清掃します。



電源ボタン下の通気口およびUSB／電源／イーサネットポートは拭か**ない**でください。

クリーニング時、検査器を次に曝露しないこと：

- | | |
|-----------------------|----------------|
| X 有機溶剤 | X 殺虫剤 |
| X アンモニア含有クリーナー | X 消毒剤 |
| X 油性マーカー | X 研磨剤 |
| X 揮発性液体を含むスプレー | X 室内用消臭 |