

IDEXX スナップ Pro

IDEXX スナップ Pro*は、スナップキットの検査結果を自動で読み取り、IDEXX ベットラボ*ステーションに送信できます。IDEXX スナップ Proの新しいProRead*の機能により、スナップ*キットの検査結果を自動的に読み取ることで、お客様の操作の手間を省き、IDEXX スナップ Proをより価値のあるものにします。

ProRead結果の表示

これまでと同様の操作手順で検査を実施します。検査が完了すると、結果が自動的に表示されます。今まではお客様にて結果の入力が必要でしたがProRead機能によって結果入力操作は不要となります。

結果によってステータスランプの色で以下を示します。

- **緑**-すべてが陰性または正常。
- **青**-陽性または高値と判定された結果があります。
- **黄**-結果ウィンドウに非常に明るい点または予測していない色の変化（破片または淡い青み）があるため、結果の精査が必要な可能性があります。自動で表示された結果に問題がない場合は、**チェックマークアイコン**をタップして結果を保存します。そうでない場合は、適切な結果アイコンをタップした後、**チェックマークアイコン**をタップします。検査をキャンセルし、ホーム画面に戻る場合は閉じるアイコンをタップします。

ステータスランプの色は、結果の状況を示します。



結果が陽性の場合には赤。

結果は自動的に保存されます。

緑 =
結果全てが
陰性または正常。



青 =
陽性または高値と判定
された結果があります。



黄 =
お客様の確認が必要です。



操作方法の確認が必要な場合は、
お客様専用サイト
(idexxjp.com)
をご参照ください